

**verosana team Rehabilitationstechnik
Vertriebs- und Fertigungs-GmbH**

Heidenbaumstra e 4 · 74189 Weinsberg
Telefon 0 71 34 / 13 88-0
Telefax 0 71 34 / 13 88-100
info@verosana.de
www.verosana.de

Unsere weiteren Standorte:

Bahnhofstra e 7 · 74072 Heilbronn
Telefon 0 71 31 / 59 40 7-0
Telefax 0 71 31 / 59 40 7-20

Moltkestra e 54 · 74076 Heilbronn
Telefon 0 71 31 / 17 62 5-0
Telefax 0 71 31 / 17 62 5-1

Stettenstra e 30 · 74653 K nzelsau
Telefon 0 79 40 / 98 29 27-0
Telefax 0 79 40 / 98 29 27-9

Bahnhofstra e 54 · 74348 Lauffen
Telefon 0 71 33 / 20 35 8-20
Telefax 0 71 33 / 20 35 8-30

**Der richtige Umgang mit
orthop dischen Einlagen –
f r eine erfolgreiche Therapie**

Was Sie beim Umgang mit Ihren orthopädischen Einlagen beachten sollten

Einsatz und Gebrauch

Ihre Einlagen sind ein Hilfsmittel, das individuell für Sie gefertigt wurde.

Legen Sie Ihre Einlagen bitte nur in dafür geeignetes Schuhwerk. Eventuell ist eine langsame Gewöhnung des Fußes notwendig – fragen Sie uns, wir beraten Sie gern.

Bei auftretenden Hautrötungen oder Druckbeschwerden wenden Sie sich bitte an uns.

Schuhe und Einlagentyp

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, müssen Schuhe und Einlagen aufeinander abgestimmt sein.

Beste Voraussetzung sind einlagentaugliche Schuhe, die entweder speziell dafür gemacht sind oder mit herausnehmbarem Fußbett gefertigt wurden.

Eine gute Passform der Schuhe ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.

Achten Sie bitte auf einen festen Fersenhalt, z. B. durch Schnürung oder Klettverschluss.

Wichtiger Hinweis:

In Arbeitssicherheitsschuhen dürfen nur speziell zugelassene orthopädische Einlagen verwendet werden. Andernfalls erlischt Ihr Versicherungsschutz.

Reinigung und Pflege

Lederbezogene Einlagen sollten Sie nach dem Gebrauch zum Lüften aus den Schuhen nehmen und langsam trocknen lassen.

Trocknen Sie Ihre Einlagen nicht an der Heizung, einer anderen Wärmequelle oder in der Sonne. Das kann zu Passformverlust oder Materialveränderung führen.

Die Einlagen dürfen nicht über 50°C Grad erhitzt werden.

Kunststoff und Mikrofaserbezüge können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine Reinigungsmittel.

Lassen Sie Ihre Einlagen halbjährlich bei uns kostenlos kontrollieren, um möglichen Verschleiß bezüglich Stützung und Dämpfung zu erkennen bzw. vorzubeugen.

1/2-jährliche kostenlose Kontrolle

Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des Medizinproduktegesetzes und entspricht den Anforderungen des Anhangs 1 der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Die Tragedauer im Sinne des Medizinproduktegesetzes beträgt ein halbes Jahr. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist auf ein halbes Jahr reduziert.

Hersteller:

versana team Rehabilitationstechnik Vertriebs- und Fertigungs-GmbH
Heidenbaumstraße 4 · 74189 Weinsberg